

Scheda tecnica Filtrante Facciale **FFP2 Autorizzato INAIL**

Item 96680 / PTMYKZ-01

Descrizione :

FILTRANTE FACCIALE FFP2 KN95

Confezione :

2 Pezzi in Bustina: 2pcs/polybag, 40pcs/box, 24boxes(960pcs)/carton,
Misura cartone: 50.8x 46 x 43cm, N.W.:7.32KG, G.W.:9.73KG.

Descrittivo:

Mascherina filtrante FFP2 in tessuto non tessuto, diverse fasce regolabili.
Stringinaso regolabile.



Istruzioni per l'uso :

Prestazioni: Facciale Filtrante monouso qui descritto appartiene alla classe di protezione FFP2 secondo la norma EN149:2001+A1:2009.

Applicazioni: Protezione contro aerosol solidi e liquidi (per es. nebbie oleose) non tossici, di bassa/media tossicità in concentrazioni fino al Valore di Limite di Soglia TLV 12.

Descrizione: Mascherina filtrante FFP2 in tessuto non tessuto, diverse fasce regolabili. Stringinaso regolabile.

Durata: I facciali filtranti (UNI EN 149) devono essere impiegati solamente per un turno lavorativo e comunque devono essere sostituiti immediatamente con una nuova non appena è umida e qualora la respirazione diventasse difficoltosa a causa della saturazione del materiale filtrante.

Avvertenze: Prima di indossare un dispositivo di protezione individuale, di seguito chiamato DPI, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone. Verificate che il dispositivo sia integro e pulito. La mancata osservanza delle prescrizioni può indurre ad un uso errato del DPI e causare malattie e morte.

Prima dell'utilizzo del DPI, consultare una persona addestrata in Igiene Industriale o personale esperto in Sicurezza Occupazionale per determinare l'idoneità o meno all'utilizzo.

Questo dispositivo non fornisce ossigeno. Utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati con sufficiente tenore di ossigeno per sostenere la vita. I limiti riguardanti la presenza di ossigeno in un dato contesto per l'impiego di queste mascherine possono variare da nazione a nazione, si invita a far riferimento ai parametri definiti nella nazione d'uso. Il fabbricante sconsiglia comunque un impiego in ambienti con concentrazioni di ossigeno inferiori al 19,5%. Non utilizzare quando le concentrazioni dei contaminanti sono immediatamente pericolose per la salute o la vita. Non utilizzare in atmosfera dove esiste pericolo d'esplosione. Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se (A) la respirazione diventa difficoltosa, (B) si avvertono senso di angoscia o vertigini. Peli di barba, ed affezioni respiratore possono ridurre l'efficienza di questo facciale filtrante. Non modificare e alterare in nessun modo il facciale filtrante se danneggiato buttarlo. Solo monouso. Non richiede manutenzione.

Rimozione e smaltimento del DPI: Con una mano afferrare gli elastici e portarli davanti al viso mentre con l'altra mano afferrare e trattenere il dispositivo allontanandolo poi dal volto. Eliminare il facciale e lavarsi accuratamente le mani. Attenzione: Tutti i dispositivi monouso devono essere smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti.

Respiratore di protezione contro le particelle solide e liquide non deve essere utilizzata per oltre un giorno lavorativo -.

Efficienza filtrante totale > 92%.

Limiti d'uso :

Per portare il respiratore l'utente deve ricevere la formazione necessaria e deve aver letto il manuale per l'uso prima di utilizzarlo. Utilizzare il respiratore in zone aerate bene, ossigenate (> a 19.5%) e che non contengono atmosfere esplosive. Il respiratore deve essere perfettamente posizionato per garantire il livello di protezione previsto. Non utilizzare se i peli del viso (barba, basette) impediscono l'impermeabilità del respiratore e provocano una perdita. Andare via immediatamente se la respirazione diventa difficile e/o se si provano degli stordimenti o malesseri.

Il non rispetto di queste istruzioni per l'uso può provocare danni alla salute dell'utente ed esporlo a seri traumi, o mettere la sua vita in pericolo. Questa maschera non deve essere utilizzata in più di un solo posto di lavoro. Utilizzare soltanto nel suo campo d'applicazione definito nelle istruzioni. Il contatto con la pelle può provocare delle reazioni allergiche alle persone sensibili. In questo caso, lasciare la zona a rischio, togliere il respiratore e consultare un medico.

Istruzioni di stoccaggio :

Stoccare al fresco, all'asciutto, al riparo da gelo e luce, nella sua confezione d'origine.

Stoccare a temperatura compresa tra -30° e +40°C con un'umidità massima di <80%.

Il codice identificativo del modello **KN95 / PTMYKZ-01**

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO



**DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE autorizzato
INAIL con documento protocollato con segnatura:
U.INAIL.72000.31/03/2020.0003755**

